


INSTRUKCJA

Montażu tablicy ściennej do defibrylatora AED Reanibex 100

Skład zestawu

W zestawie z tablicą znajdują się wszystkie elementy potrzebne do montażu zarówno uchwytu jak i tablicy do ściany. W skład zestawu wchodzi:

- 1 sztuka: tablica ścienna (A)
- 1 sztuka: uchwyt do defibrylatora AED (B)
- 4 zestawy montażowe do ściany: kołek montażowy z wkrętem (C), dystans (D), zaślepka (E)
- 4 zestawy montażowe do uchwytu: śrubka (F), podkładka (G), nakrętka (H)

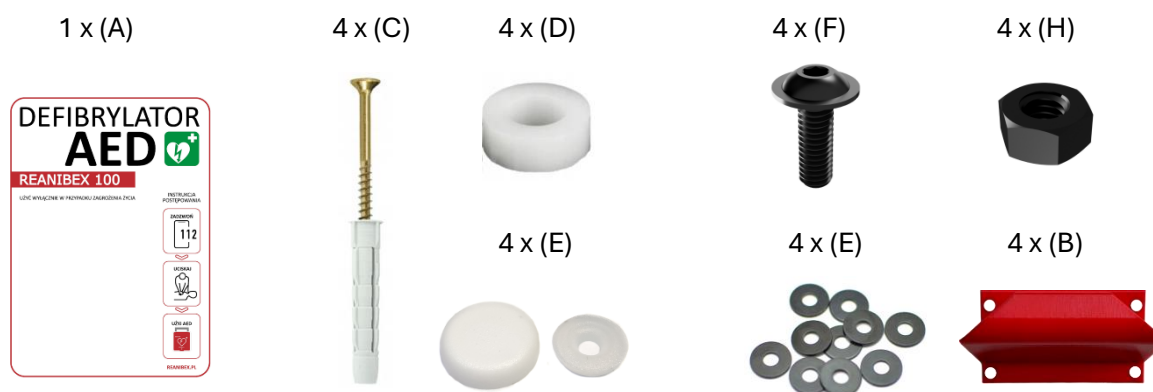

Sposób montażu tablicy do ściany

1. Przyłóż tablicę do ściany w docelowym miejscu, ustaw w poziomie i odznacz 4 otwory znajdujące się na narożnikach tablicy
2. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach za pomocą wiertła o średnicy 8 mm na głębokość 50 mm, a następnie umieść w nich kołki montażowe
3. Przymocuj uchwyt na defibrylator AED do tablicy ściennej. W tym celu przyłóż go w miejscu nawierconych w tablicy otworów, a następnie przetóż przez nie 4 śrubki z zestawu (element E) na wylot tablicy. Następnie na końcówki śrubek po drugiej stronie tablicy nałóż podkładki (element G) i dokręć nakrętki (element H), aby mocowanie uchwytu było stabilne. **Uwaga! Przy montażu uchwytu nie korzystaj z elektronarzędzi na wysokich obrotach, może to spowodować defekty w elementach zestawu**



4. Tablicę z założonym uchwytem na defibrylator AED przymocuj do ściany. W tym celu przetknij każdy z wkrętów przez podstawę zaślepki i przetóż je wszystkie przez tablicę. Po drugiej stronie tablicy nałóż na wkręty dystanse i przykręć całość do ściany wykorzystując wcześniej zaaplikowane kotki montażowe.
5. W ostatnim kroku nałóż na przód wkrętów zaślepki.

